

OPHTALMIC
jazz
Comfort®

**Solution
d'entretien
multifonctions**

Contient de
l'**allantoïne**
et de l'**acide
hyaluronique**

Pour tous types de
lentilles souples




OPHTALMIC
CONTACTOLOGIE

www.ophtalmic-compagnie.fr



FORMULATION UNIQUE POUR UN CONFORT PROLONGÉ

JAZZ Comfort® est formulé avec de l'**acide hyaluronique** et de l'**allantoïne**, deux composants naturels très utilisés en ophtalmologie.

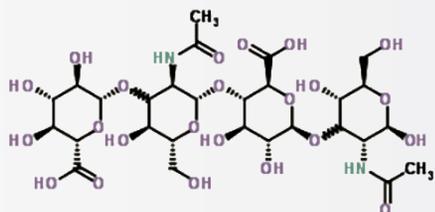


L'**acide hyaluronique** est un composant biologique aux propriétés hydratantes qui s'est avéré efficace dans les traitements de la sécheresse oculaire^{1,2}.

Naturellement présent dans les larmes, l'acide hyaluronique semble être également impliqué dans le maintien de l'intégrité cornéenne³.

Sa forte affinité avec l'eau lui confère des propriétés visco-élastiques. En effet, l'acide hyaluronique peut se lier avec plusieurs molécules d'eau. Sous une pression mécanique (par exemple clignement), l'eau est expulsée des molécules d'acide hyaluronique ; lorsque la pression diminue, l'eau est absorbée à nouveau.

L'**allantoïne** est une molécule naturelle utilisée en ophtalmologie pour ses effets apaisants et anti-irritants⁴.


En plus de ses propriétés apaisantes, l'allantoïne possède des propriétés hydratantes en augmentant la capacité des cellules cornéennes à capter l'eau⁵.

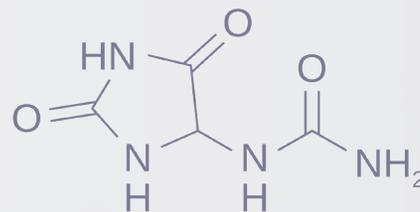

1. Debbasch C, De La Salle SB, Brignole F, Rat P, Warner JM, Baudouin C. Cytoprotective effects of hyaluronic acid and Carbomer 934P in ocular surface epithelial cells. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2002;43:3409-15.
2. Aragona P, Papa V, Micali A, Santocono M, Milazzo G. Long term treatment with sodium hyaluronate-containing artificial tears reduces ocular surface damage in patients with dry eye. Br J Ophthalmol. 2002;86:181-4.
3. Gomes JA, Amankwah R, Powell-Richards A, Dua HS. Sodium hyaluronate (hyaluronic acid) promotes migration of human corneal epithelial cells in vitro. Br J Ophthalmol. 2004;88:821-5.
4. Narrative of an investigation concerning an ancient medical remedy and its modern utilities, the Symphytum Officinale and its contained Allantoin, Charles J. Macalister, 1936.
5. Evaluation of the efficacy of allantoin. Henning T, Euro Cosmetics, 2: 20-22. 2001.

QUELQUES MOTS DU DOCTEUR THIERRY BURY DE L'HÔPITAL DES 15-20

Docteur T. Bury
Ophthalmologiste à Paris 11^{ème}
Et au CHU des 15/20

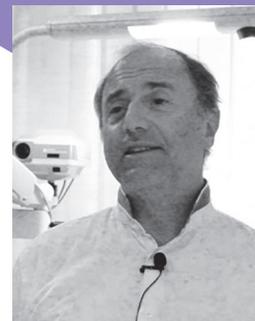

“

Malgré toutes les améliorations technologiques des nouveaux matériaux ou géométrie des lentilles de contact, **de nombreux porteurs continuent de ressentir une gêne en fin de journée, voire sont contraints d'abandonner le port quotidien de leurs lentilles.**

Les conditions de vie modernes sont à juste titre souvent incriminées (travail sur écran, tablette, smartphone, air conditionné, pollution).

Autant de facteurs qui fragilisent la surface oculaire et compliquent le port des lentilles.

Or, en cas d'inconfort il est recommandé, avant de changer de lentille, de commencer par changer de solution d'entretien !

”

JAZZ Comfort® peut être recommandé aux porteurs souffrant de sensation d'œil sec.

Le complexe allantoïne-acide hyaluronique apporte aux lentilles de contact :

- Une hydratation naturelle et optimale
- Une amélioration du confort et une meilleure tolérance oculaire


JAZZ Comfort® répond non seulement aux critères de décontamination sur les bactéries et les champignons, mais contribue aussi à la biocompatibilité oculaire et au confort des lentilles de contact souples y compris en silicone-hydrogel.

Une étude clinique sur 30 porteurs qui ont testé la solution **JAZZ Comfort®*** pendant 1 mois a démontré que la solution d'entretien a contribué à l'amélioration du confort visuel et a réduit les problèmes de sécheresse oculaire chez certains porteurs.

L'étude a été menée sur 3 groupes de porteurs de lentilles de contact :


- 10 primo-porteurs
- 10 porteurs utilisant d'autres solutions d'entretien
- 10 porteurs présentant des anomalies du film lacrymal

Observations chez les porteurs présentant des anomalies du film lacrymal

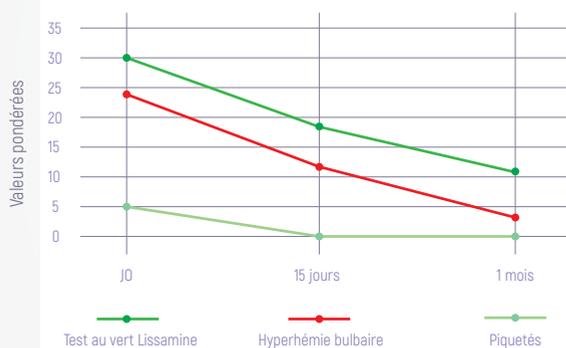

Les résultats à la lampe à fente démontrent une diminution des piquetés ainsi que de la sécheresse oculaire. La solution **JAZZ Comfort®** contribue ainsi au confort des lentilles et participe à améliorer la santé oculaire.

Mesure de la sensation des lentilles chez les primo porteurs et les anciens porteurs après utilisation du **JAZZ Comfort®**

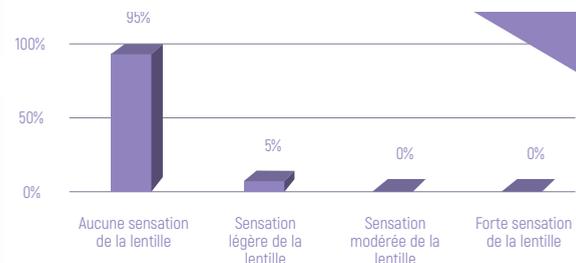

95% des primo-porteurs et porteurs utilisant une autre solution d'entretien sont satisfaits du **JAZZ Comfort®**. Aucune sensation désagréable telle que des brûlures, des rougeurs ou une gêne n'a été constatée au moment du port des lentilles après entretien avec la solution.

COMPOSITION

PRINCIPES ACTIFS	ACTIONS
PHMB (0,0002 %)	<ul style="list-style-type: none">· Décontamine
Allantoïne	<ul style="list-style-type: none">· Apaise et hydrate· Effet cicatrisant
Acide hyaluronique	<ul style="list-style-type: none">· Hydrate et lubrifie· Antioxydant⁶
Poloxamer	<ul style="list-style-type: none">· Elimine les dépôts lipidiques et protéiques· Inhibe l'adhérence de certains micro-organismes
Tampon phosphate	<ul style="list-style-type: none">· Stabilise le pH de la solution d'entretien
EDTA (0,01 %)	<ul style="list-style-type: none">· Augmente l'action nettoyante du poloxamer· Augmente la sensibilité des micro-organismes au décontaminant

INDICATIONS

Nettoyage, décontamination, conservation, hydratation, lubrification, rinçage.

Pour tous types de lentilles souples en hydrogel et silicone-hydrogel.

Le massage des lentilles est obligatoire.

6. Debbasch C, De La Salle SB, Brignole F, Rat P, Warnet JM, Baudouin C. Cytoprotective effects of hyaluronic acid and Carbomer 934P in ocular surface epithelial cells. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2002;43:3409-15.



CONDITIONNEMENTS



100 ml
+ 1 étui

360 ml
+ 1 étui

Pack 6 mois
(3 x 360 ml)
+ 3 étuis

CONTACTS



0 820 777 510

Service 0,12 €/min
+ prix appel



0 820 777 515

Service 0,12 €/min
+ prix appel

COMMANDES@OPHTALMIC.FR

Ophtalmic
CONTACTOLOGIE

www.ophtalmic-compagnie.fr

JAZZ Comfort est une solution multifonctions destinée à l'entretien des lentilles de contact. Il s'agit d'un dispositif médical de classe IIb – Fabricant Lapis Lazuli. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE 0413. Lire attentivement les mentions figurant sur la notice du produit pour une utilisation correcte – Ce dispositif médical n'est pas pris en charge par l'assurance maladie – BROPRO-JAZZCOM-102018-V2