

SOLUTION

OPHTALMIC
jazz
ClearPlus



Solution d'entretien **Oxydante**
pour tous types de lentilles : **souples ou rigides**

Sans conservateur à la pose

ophthalmic
COMPAGNIE




DÉCONTAMINATION COMPLÈTE


Le comprimé pelliculé permet de retarder le début du processus de neutralisation de la solution de façon à immerger les lentilles dans une solution de peroxyde d'hydrogène à 3% pendant 12 minutes. Cet effet retard permet d'avoir une action complète de :

- **Nettoyage**
- **Décontamination¹**
- **Déprotéinisation²**


Activité décontaminante sur les bactéries*

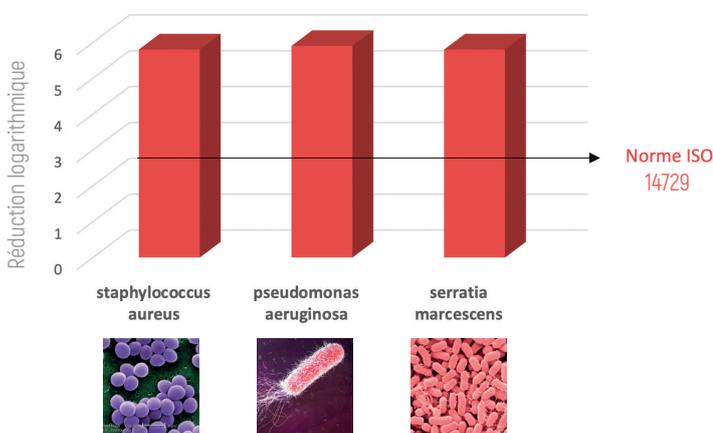

Activité décontaminante sur les champignons*

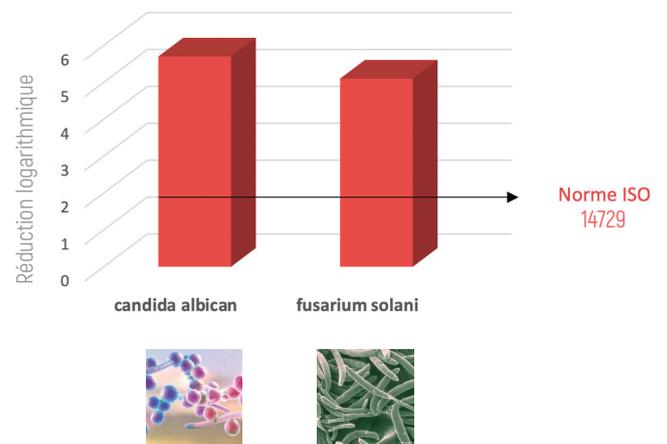

Evolution de la concentration **en peroxyde d'hydrogène sur 1H**

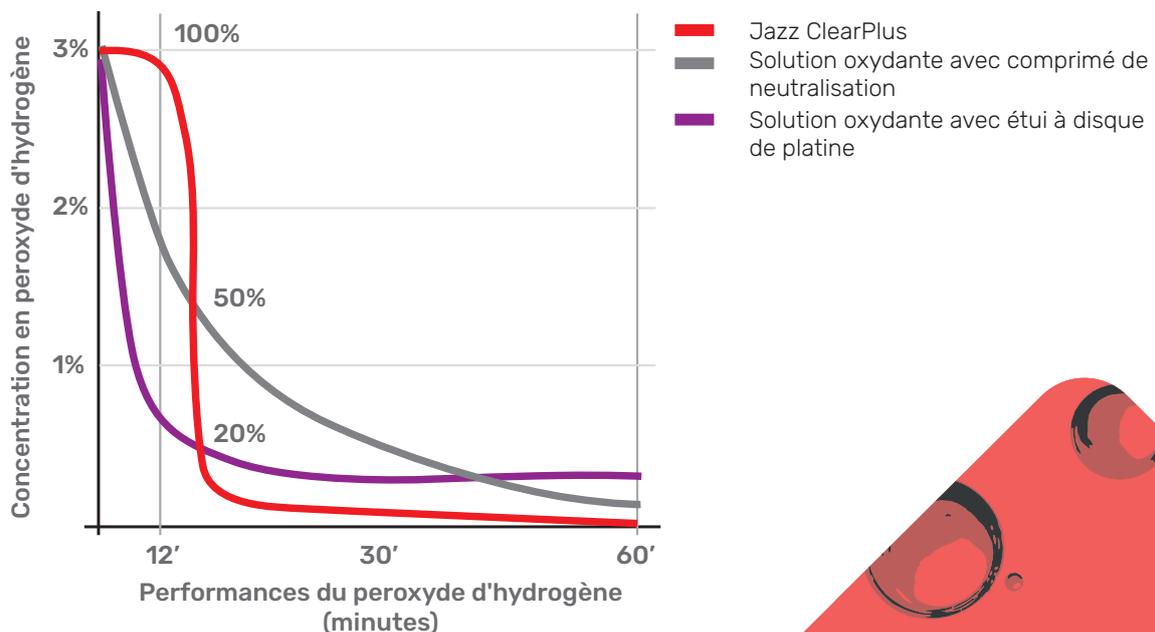


1. Etude laboratoire Echevarne madrid 2013

2. Etude Eurofins 2015


*Etude DISOP 2021 - Biolab Madrid
Evaluation of antimicrobial activity of products for contact lens solutions

OPHTHALMIC jazz ClearPlus

Les lentilles prêtes à l'emploi en seulement
1H avec Jazz ClearPlus

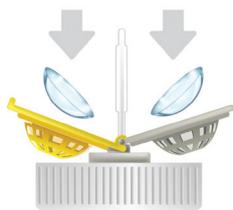

Décontamination et déprotéinisation complètes grâce à l'immersion dans une solution **avec une concentration de peroxyde d'hydrogène à 3% pendant 12 minutes.**

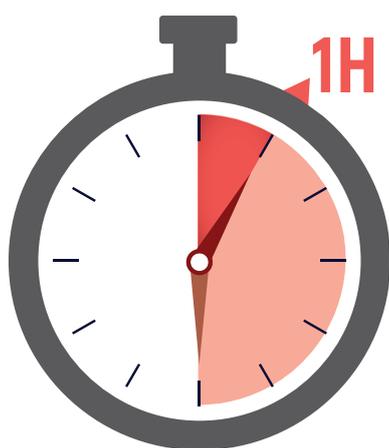

1H OPHTHALMIC jazz ClearPlus



Après 12 minutes, le revêtement du comprimé est pratiquement dissous, les premières bulles d'oxygène commencent à se former : **le processus de neutralisation et de rinçage de la lentille débute.**



Neutralisation complète au bout d'1H de trempage.
La coloration en jaune de la solution permet de s'assurer que la solution est neutralisée.

6H Solutions oxydantes standards



Scannez et découvrez la vidéo d'utilisation de **JAZZ ClearPlus**.



Solution totalement neutralisée et sans conservateur, pas besoin de rincer la lentille avant de la poser sur l'œil.

Sans conservateur

JAZZ ClearPlus diminue le risque d'intolérance et préserve la santé oculaire³

3. Epstein, S. P.; Ahdoot, M.; Marcus, E.; Asbell, P. A. Comparative Toxicity of Preservatives on Immortalized Corneal and Conjunctival Epithelial Cells. *Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics* 2009, 25 (2), 113

OPHTHALMIC jazz

COMPOSITION

	PRINCIPES ACTIFS	ACTIONS
SOLUTION	Peroxyde d'hydrogène (3 %)	Décontamination, désinfection ¹ , déprotéinisation ²
COMPRIMÉ	Enzyme catalase	Neutralisation du peroxyde d'hydrogène
	Sels de chlorure de sodium et de phosphate	Osmolarité et pH équivalents aux larmes
	Vitamine B2	Indicateur coloré jaune (témoin de la neutralisation)
	PVP	Accroît la viscosité et prolonge le confort

INDICATIONS

Nettoyage, décontamination, déprotéinisation.

Pour tous types de lentilles souples, rigides, d'orthokératologie et mini sclérales (diamètre compris entre 12.5 et 17mm).

CONDITIONNEMENTS



360 ml + 36 comprimés
(36 jours)



Pack 3 mois + 18 jours
3X360 ml + 108 comprimés



Format voyage : 60ml +6 comprimés
(6 jours)

Contacts - Commandes :

Tél : **0 820 777 510** Service 0,12 € / min
prix appel

Fax : **0 820 777 515** Service 0,12 € / min
prix appel

Mail : commandes@ophtalmic.fr