

SOLUTION

OPHTALMIC

jazz

PerOxyde 2H®



Solution d'entretien  
**Oxydante**

Contient du  
**Peroxyde d'hydrogène**


 **phtalmic**  
CONTACTOLOGIE

# UN CHOIX PRATIQUE ET UN GAGE DE SÉCURITÉ


## Phase blanche du comprimé

La phase blanche du comprimé exerce une action de nettoyage en profondeur qui amplifie l'efficacité décontaminante du peroxyde (supérieure aux exigences de la norme ISO 14729)



Activité décontaminante sur les bactéries\*

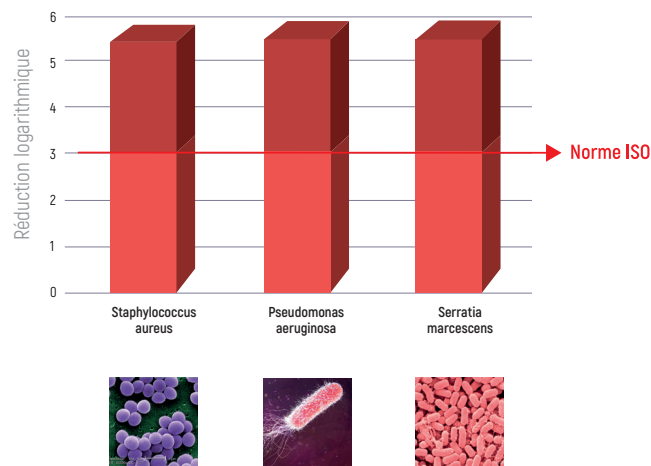

Activité décontaminante sur les champignons\*

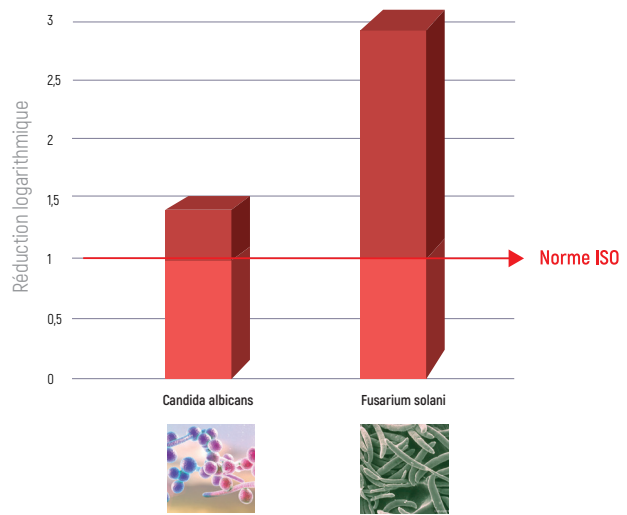

Efficacité d'élimination des amibes

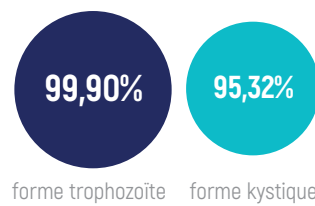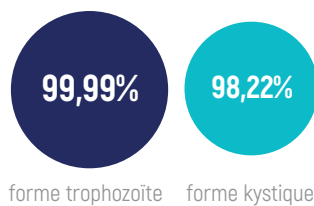

## Phase verte du comprimé


- Neutralisation complète du peroxyde d'hydrogène.
- Indicateur coloré vert naturel (Chlorophylle et Riboflavine) permettant de s'assurer que la solution est bien neutralisée et que le comprimé n'a pas été oublié.
- Présence de PVP pour accroître la viscosité et prolonger le confort de port.



\*Etude AVIZOR- Biolab Madrid

### 3 FOIS PLUS RAPIDE

que les systèmes oxydants classiques : **en deux heures**, les lentilles sont prêtes à l'emploi avec **JAZZ PerOxyde 2h®**.

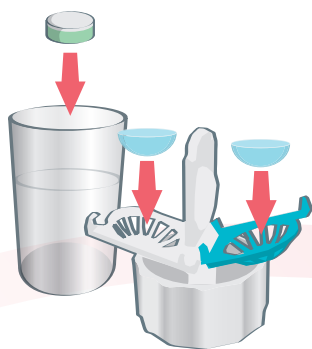

Décontamination et déprotéinisation quotidienne **sans massage**.



Neutralisation complète au bout de 2H.  
Coloration en jaune vert de la solution pour s'assurer que la solution est neutralisée.



**2H**  
JAZZ PerOxyde 2h®

**6H**

Solutions oxydantes standards



Solution totalement neutralisée et sans conservateur, pas besoin de rincer la lentille avant de la poser sur l'oeil.

### HYPOALLERGÉNIQUE

Sans conservateur, **JAZZ PerOxyde 2h®** diminue significativement le risque d'intolérance et d'allergie.

OPHTALMIC  
jazz

# COMPOSITION


	PRINCIPES ACTIFS	ACTIONS
SOLUTION	Peroxyde d'hydrogène (3 %)	Décontamination renforcée
COMPRIMÉ	Enzyme catalase	Neutralisation du peroxyde d'hydrogène
	Sels de chlorure de sodium et de borate	Osmolarité et pH équivalents aux larmes
	Chlorophylle Vitamine B2 (Riboflavine)	Indicateur coloré naturel vert (témoin de la neutralisation)
	Subtilisine A	Déprotéinisation Nettoyage en profondeur de la lentille Élimination des protéines et des lipides
	PVP	Accroît la viscosité et prolonge le confort

## INDICATIONS

Nettoyage, décontamination, déprotéinisation.

Pour tous types de lentilles souples ET rigides, particulièrement indiqué pour l'entretien des lentilles d'orthokérotologie.

## CONDITIONNEMENTS

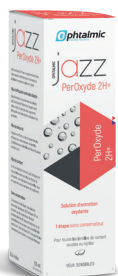

225 ml (30 jours)  
+ 30 cps



Pack 3 mois (2 x 350 ml)  
+ 90 cps

### Contacts - Commandes :

Tél : **0 820 777 510** Service 0,12 € / min  
prix appel

Fax : **0 820 777 515** Service 0,12 € / min  
prix appel

Mail : [commandes@ophthalmic.fr](mailto:commandes@ophthalmic.fr)

**ophthalmic**  
CONTACTOLOGIE

[www.ophthalmic-compagnie.fr](http://www.ophthalmic-compagnie.fr)